

Mode d'emploi

OTICON | **Opn**
mini RITE



Made for



iPod



iPhone



iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Présentation du modèle

Ce mode d'emploi concerne les modèles d'aides auditives suivants :

Oticon Opn 1 mini RITE avec NFMI et fonctionnalité radio 2,4 GHz.

- Écouteur 60
- Écouteur 85

Introduction

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouvelle aide auditive. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la **section Avertissements**. Il décrit comment utiliser au mieux votre nouvelle aide auditive.

Votre audioprothésiste a programmé cette aide auditive en fonction de vos besoins. Si vous avez des questions non abordées dans ce mode d'emploi, contactez votre audioprothésiste.

| **À propos de** | Démarrage | Manipulation | Options | Avertissements | Plus d'informations |

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

Usage prévu

L'aide auditive est destinée à amplifier et transmettre le son à l'oreille et compenser ainsi les déficiences auditives relevant d'une perte auditive légère à modérée-sévère. L'aide auditive n'est pas destinée à une utilisation par des nourrissons/enfants de moins de 36 mois.

REMARQUE IMPORTANTE

L'amplification de l'aide auditive est ajustée de façon unique et optimisée selon vos capacités auditives personnelles au cours de l'adaptation de l'aide auditive effectuée par votre audioprothésiste.

Sommaire 1/2

À propos de

Identifier l'écouteur et l'embout de votre aide auditive	10
Votre aide auditive - Descriptif	12
Utilisation	13
Identifier l'aide auditive gauche et droite	14
Pile (taille 312)	15
Outil multi-usages pour manipulation des piles et nettoyage	16

Démarrage

Allumer et éteindre l'aide auditive	18
Quand remplacer une pile	19
Remplacer la pile	20

Manipulation

Mettre l'aide auditive	22
Entretenir votre aide auditive	24
Remplacer le filtre ProWax miniFit	26
Embouts standards : dôme ou Grip Tip	28
Remplacer le dôme ou le Grip Tip	29
Embouts personnalisés: Micro-Embout ou LiteTip	30
Nettoyer le Micro-Embout ou LiteTip	31

Options

Mode avion	32
Fonctions et accessoires en option	33
Changer le volume (en option)	34
Activer le mode silencieux de l'aide auditive (en option)	35
Changer le programme (en option)	36
Réinitialisation rapide	38
Utiliser les aides auditives avec iPod, iPhone et iPad	39

Suite page suivante

Sommaire 2/2

Appairer l'aide auditive avec l'iPhone	40
Application Oticon ON	43
Accessoires sans fil (en option)	44
Autres options (en option)	45

Avertissements

Utilisation des aides auditives	46
Risques d'étouffement et risque d'avaler les piles	47
Utilisation des piles	48
Dysfonctionnement	48
Implants actifs	49
Radiographie, tomodensitométrie, IRM, TEP scan et électrothérapie	49
Chaleur et produits chimiques	50
Effets secondaires possibles	50
Interférences	51
Utilisation en avion	51


Suppléments

Guide de dépannage	52
Résistant à l'eau et à la poussière (IP68)	54
Conditions d'utilisation	55
Certificat de garantie	56
Garantie internationale	57
Informations techniques	58

Identifier l'écouteur et l'embout de votre aide auditive

Écouteurs

L'aide auditive mini RITE peut être fournie avec deux écouteurs différents :

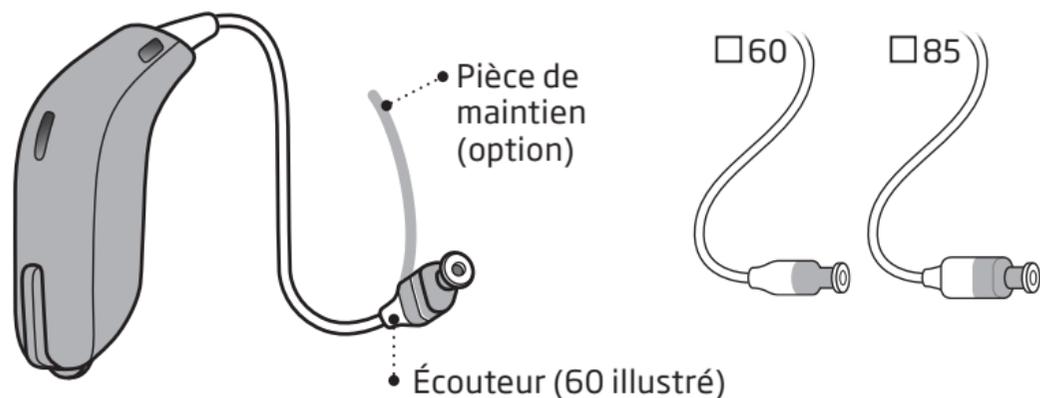

Embouts

L'écouteur utilise l'un des embouts suivants :



Dôme (dôme ouvert illustré)*



Grip Tip



Micro-Embout VarioTherm® ou LiteTip




Micro-Embout ou LiteTip


* Référez-vous aux instructions de remplacement du dôme ou du Grip Tip à la section : Remplacer le dôme ou le Grip Tip

® VarioTherm est une marque déposée de Dreve

Votre aide auditive - Descriptif

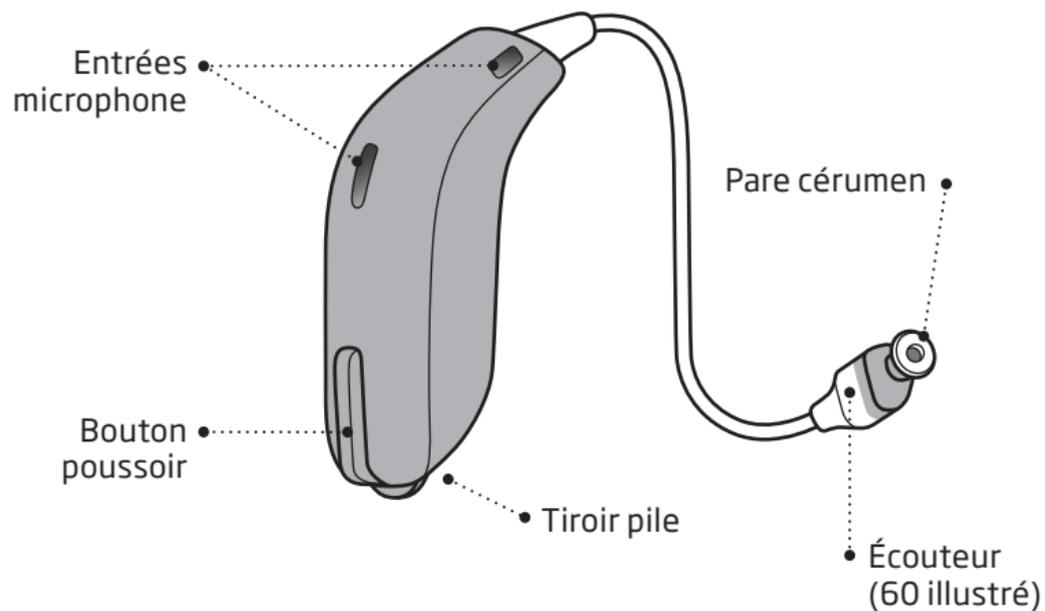


Utilisation

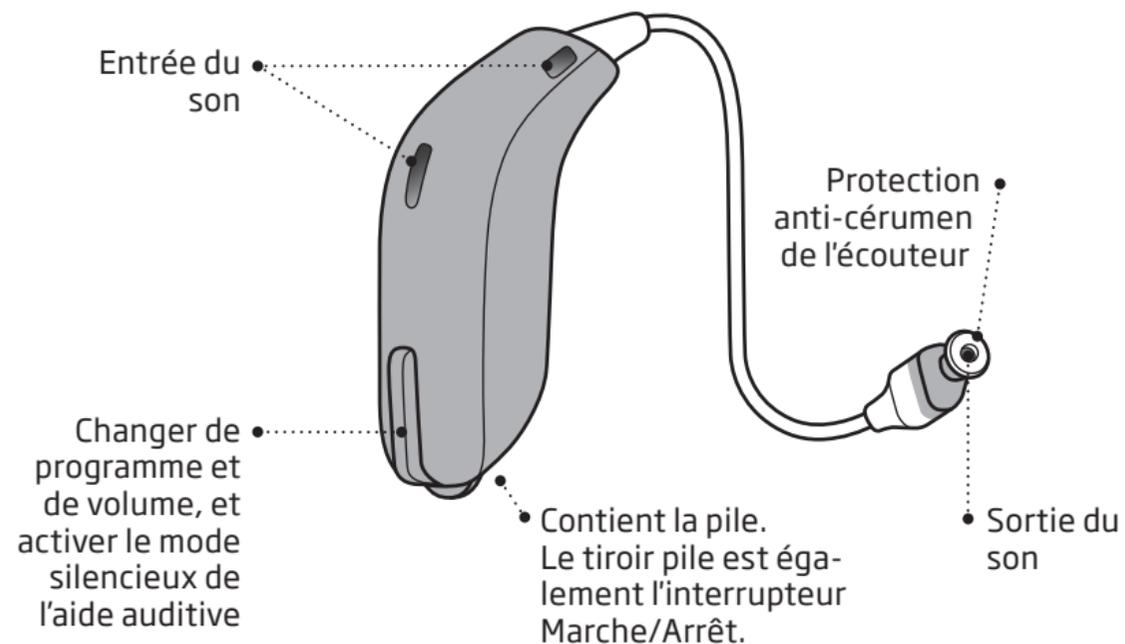


Identifier l'aide auditive gauche et droite

Il est important de distinguer l'aide auditive gauche de l'aide auditive droite car elles peuvent être programmées différemment. Vous trouverez des points de couleur gauche/droit à l'intérieur du tiroir pile, sur les écouteurs 60 et 85, sur les Micro-Embouts ou sur les LiteTips.

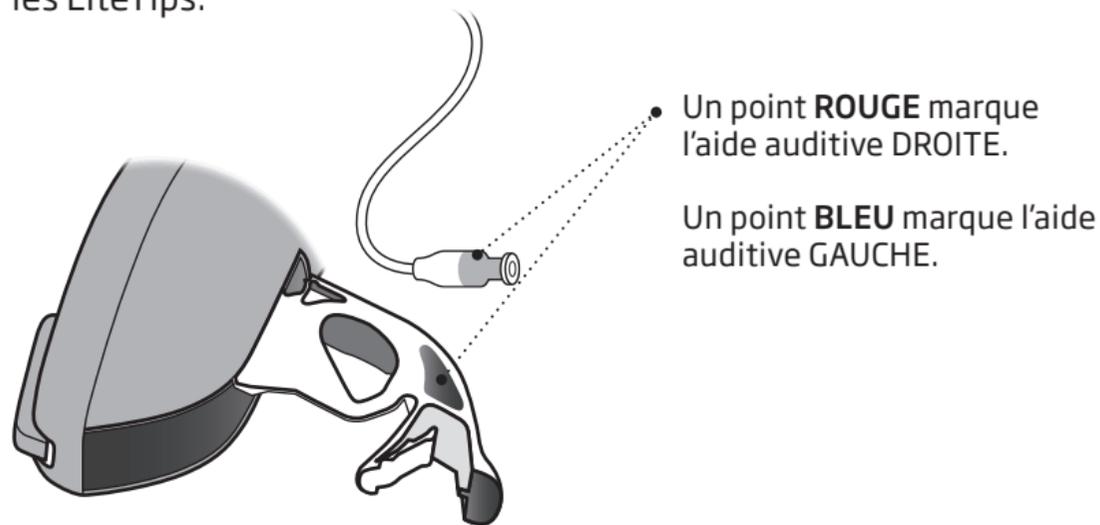


Pile (taille 312)

Votre aide auditive est un dispositif électronique miniature qui fonctionne avec des piles spéciales. Pour activer l'aide auditive, vous devez insérer une pile neuve dans le tiroir pile. Découvrez comment procéder dans la section « Remplacer la pile ».

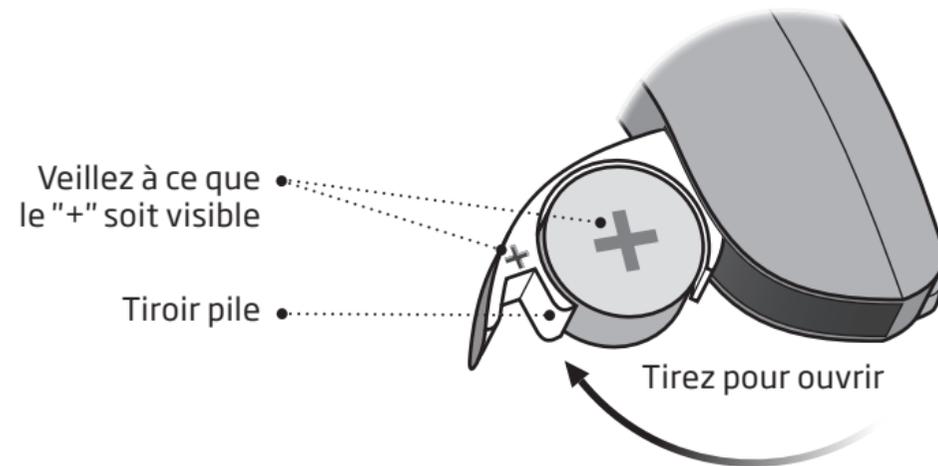

Outil multi-usages pour manipulation des piles et nettoyage

L'outil multi-usages contient un aimant qui facilite le remplacement de la pile dans l'aide auditive. Il contient également une brosse et une boucle de fil pour nettoyer et enlever le cérumen. Si vous avez besoin d'un nouvel outil multi-usages, veuillez contacter votre audioprothésiste.

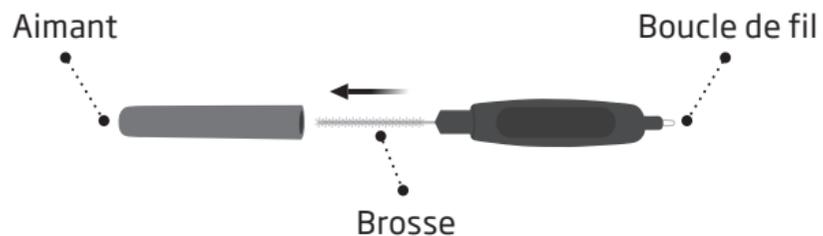

REMARQUE IMPORTANTE


L'outil multi-usages possède un aimant intégré. Placez l'outil multi-usages à au moins 30 cm des cartes de crédit et d'autres objets magnétiques.

Allumer et éteindre l'aide auditive

Le tiroir pile est utilisé pour allumer et éteindre l'aide auditive. Pour économiser la durée de vie de la pile, assurez-vous de bien éteindre votre aide auditive lorsque vous ne vous en servez pas.


Allumer

Fermez le tiroir pile avec la pile en place.

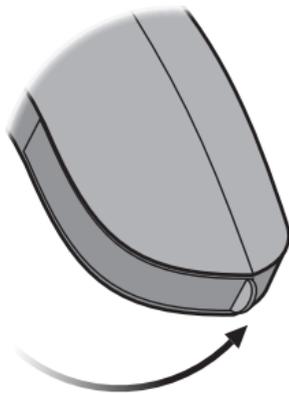

Éteindre

Ouvrez le tiroir pile.

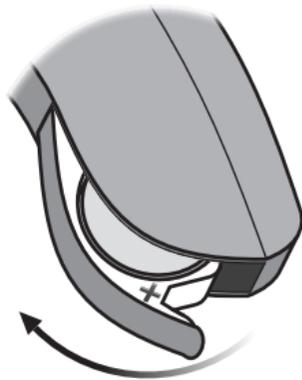

Quand remplacer une pile

Lorsque la pile doit être remplacée, vous entendez deux bips répétés à intervalles modérés jusqu'à épuisement total de la pile.



Trois bips
= La pile devient faible




Quatre bips
= La pile est vide

Astuce concernant la pile

Pour vous assurer que l'aide auditive fonctionne en permanence, prenez des piles de rechange sur vous ou remplacez la pile avant vos déplacements.


Remplacer la pile

1. Retirer

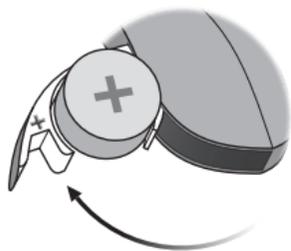


Ouvrez complètement le tiroir pile. Retirez la pile.

2. Déballer

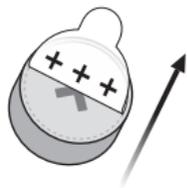

Retirez l'étiquette autocollante sur le côté positif (+) de la nouvelle pile. Laissez la pile s'aérer une vingtaine de secondes.

3. Insérer

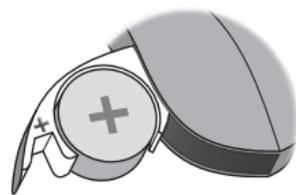


Insérez la nouvelle pile dans le tiroir pile. Veillez à ce que le côté positif (+) soit tourné vers le haut.

4. Fermer



Refermez le tiroir pile. L'aide auditive diffusera une petite musique dans l'embout. Tenez la sortie son près de votre oreille pour entendre la petite musique.

Embout

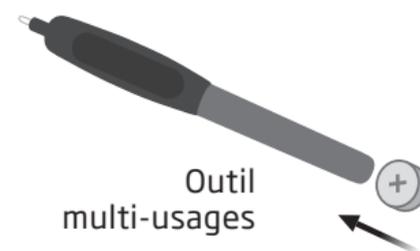


L'outil multi-usages peut être utilisé pour changer la pile. Utilisez l'extrémité magnétique pour retirer et insérer les piles.

L'outil multi-usages est fourni par votre audioprothésiste.

Mettre l'aide auditive

L'écouteur permet de transférer le son à votre oreille. L'écouteur doit toujours être utilisé avec un embout attaché. Utilisez uniquement des pièces conçues pour votre aide auditive.

Si l'écouteur possède une pièce de maintien, placez-la dans l'oreille de façon à ce qu'elle suive le contour de l'oreille (voir étape 3).

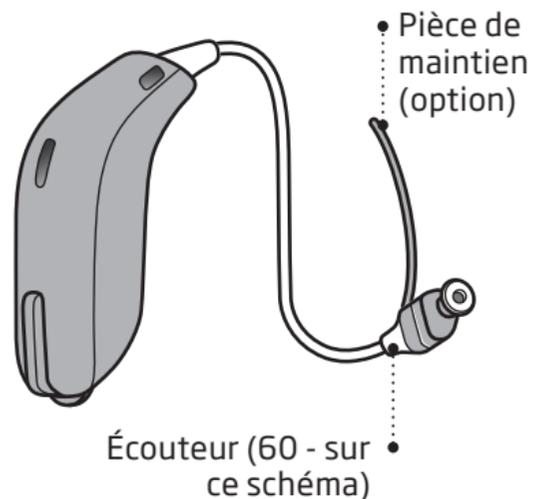


Étape 1



Placez l'aide auditive derrière votre oreille.

Étape 2

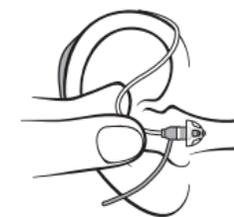

Tenez la courbe du fil de l'écouteur entre votre pouce et votre index. L'embout doit être orienté vers l'ouverture du conduit auditif.

Étape 3



Insérez doucement l'embout dans votre conduit auditif jusqu'à ce que le fil de l'écouteur se loge dans votre oreille.

Entretien votre aide auditive


Lorsque vous manipulez votre aide auditive, tenez-la au-dessus d'une surface lisse pour éviter de l'abîmer si elle tombe.

Nettoyer les entrées du microphone

Brossez délicatement les impuretés qui se trouvent dans les ouvertures. Brossez délicatement la surface. Veillez à ce que la brosse soit propre et qu'elle ne soit pas enfoncée dans les ouvertures.

Pare cérumen

L'écouteur possède un pare cérumen blanc à l'extrémité où est fixé l'embout. Le pare cérumen sert à protéger l'écouteur du cérumen et des impuretés. Si le filtre est obstrué, veuillez remplacer le pare cérumen (voir section Remplacer le filtre ProWax miniFit) ou contacter votre audioprothésiste.

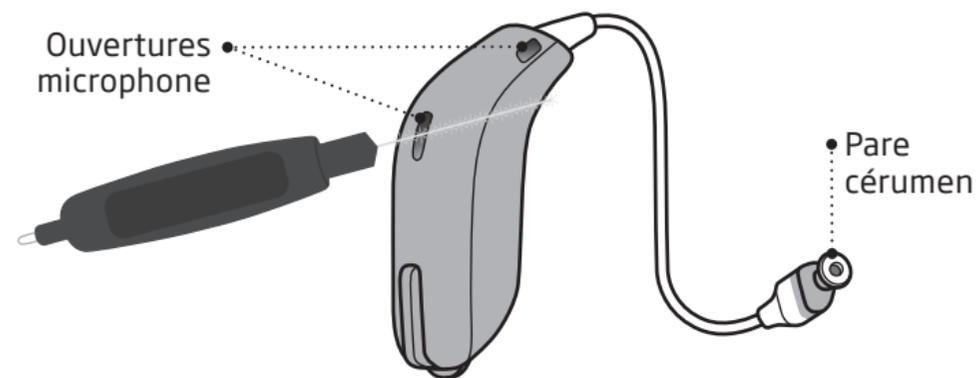


REMARQUE IMPORTANTE

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'aide auditive. Elle ne doit jamais être lavée ni immergée dans l'eau ni aucun autre liquide.

Remplacer le filtre ProWax miniFit

1. Outil

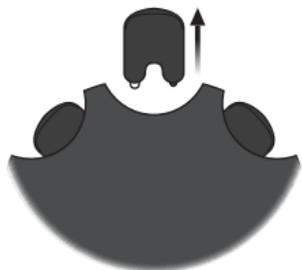

Retirez l'outil de la coque. Cet outil possède deux bras : l'un pour le retrait et l'autre pour l'insertion du nouveau pare cérumen.

2. Retirer



Insérez le bras de retrait vide dans le pare cérumen à l'intérieur de l'écouteur et retirez-le.

3. Insérer



Insérez le nouveau pare cérumen à l'aide de l'autre bras, retirez l'outil et jetez-le.

4. Résultat



L'écouteur devrait ressembler à l'image ci-dessus lorsque vous aurez remplacé le pare cérumen.

Note :

Si vous utilisez un embout, votre audioprothésiste devra remplacer le pare cérumen de votre écouteur.

Embouts standards : dôme ou Grip Tip

Les dômes et les Grip Tip sont fabriqués dans un silicone souple. Il existe 4 types de dômes différents. Nous vous invitons à vérifier votre type et votre taille de dôme ci-dessous.




REMARQUE IMPORTANTE

Si l'embout n'est pas sur l'écouteur lorsqu'il est retiré de l'oreille, l'embout pourrait toujours être dans le conduit auditif. Consultez votre audioprothésiste pour de plus amples instructions.


Remplacer le dôme ou le Grip Tip

L'embout (dôme ou Grip Tip) ne doit pas être nettoyé. Si l'embout comporte des traces de cérumen, remplacez-le par un neuf. Le Grip Tip doit être remplacé au moins une fois par mois.

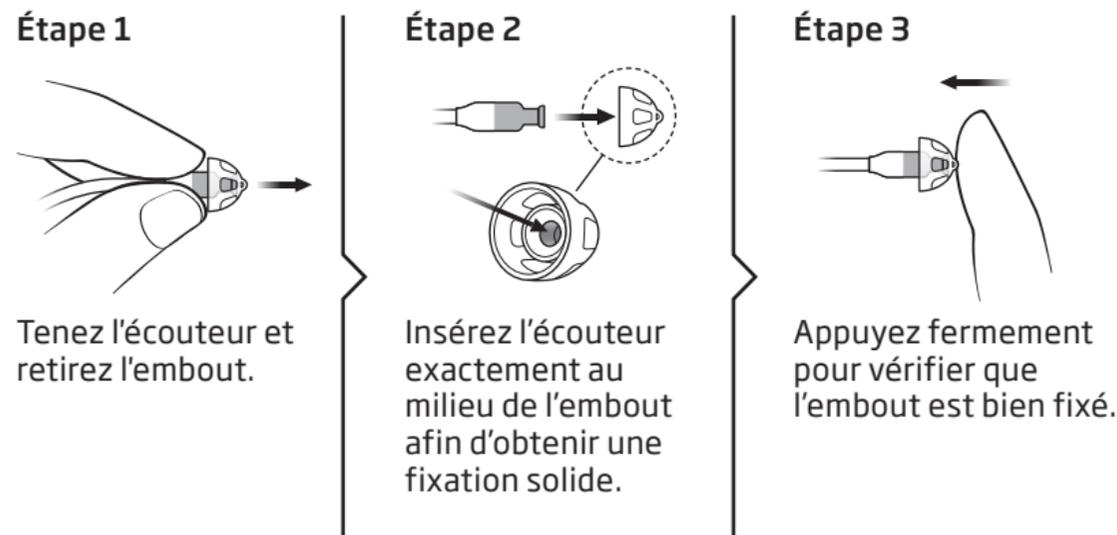

Embouts personnalisés: Micro-Embout ou LiteTip

Il existe 4 types d'embouts différents : Micro-Embout et LiteTip, dans deux matériaux différents. Les embouts sont réalisés sur mesure en fonction de votre oreille.

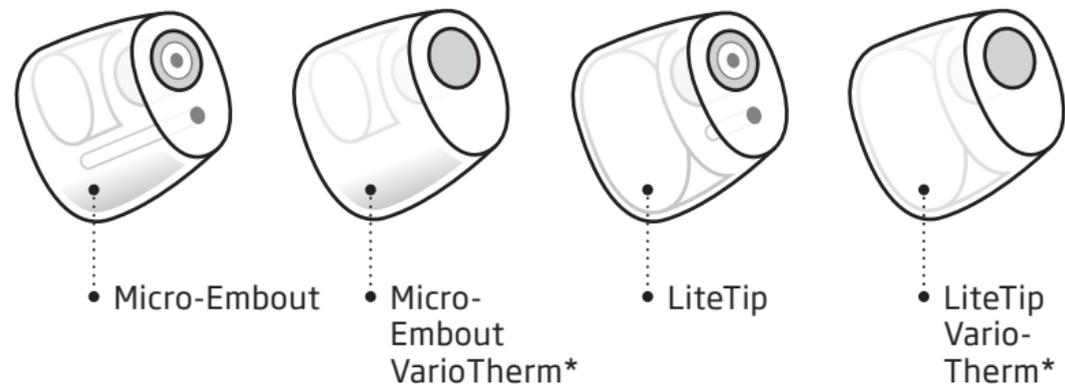


* Le Micro-Embout VarioTherm et le LiteTip ne nécessitent pas de pare cérumen

Nettoyer le Micro-Embout ou LiteTip

L'embout doit être nettoyé régulièrement.


L'embout contient un pare cérumen qui doit être remplacé lorsqu'il est obstrué ou lorsque l'aide auditive n'émet pas des sons normaux.

Utilisez toujours le pare cérumen fourni par votre audioprothésiste.

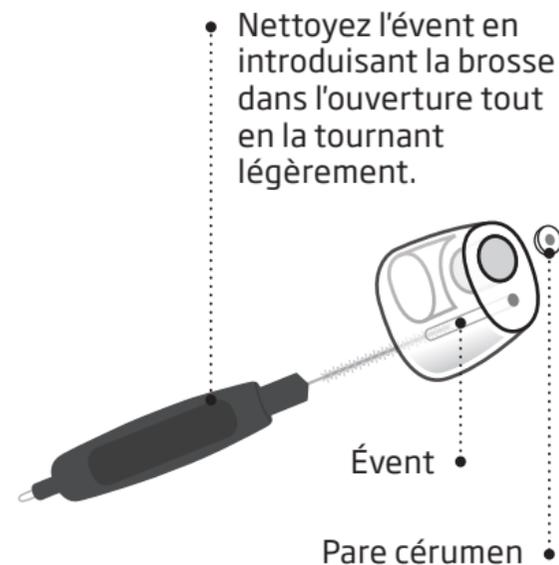

Mode avion

Lorsque vous montez dans un avion ou pénétrez dans une zone où il est interdit d'émettre des signaux radio, par exemple pendant un vol, le mode avion doit être activé. Cela n'empêche pas le fonctionnement de l'aide auditive.

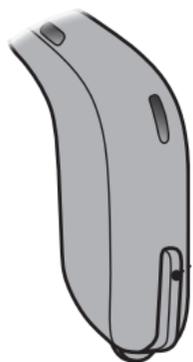

- Pour activer et désactiver le mode avion, appuyez sur le bouton poussoir pendant au moins 7 secondes et vous entendrez une petite musique.

Le mode avion se désactive en ouvrant et en refermant le tiroir pile.
Voir la section : Réinitialisation rapide.

Fonctions et accessoires en option


Les fonctions et accessoires décrits sur les pages suivantes sont proposés en option. Veuillez contacter votre audioprothésiste pour découvrir comment votre aide auditive est programmée.

Si vous êtes confronté à des situations d'écoute difficiles, un programme spécial peut vous être utile. Ils sont programmés par votre audioprothésiste.

Écrivez les situations d'écoute pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'aide.


Changer le volume (en option)

Lorsque vous avez deux aides auditives, le bouton poussoir vous permet de régler le volume dans les deux oreilles. Vous entendez un clic lorsque vous augmentez ou diminuez le volume.

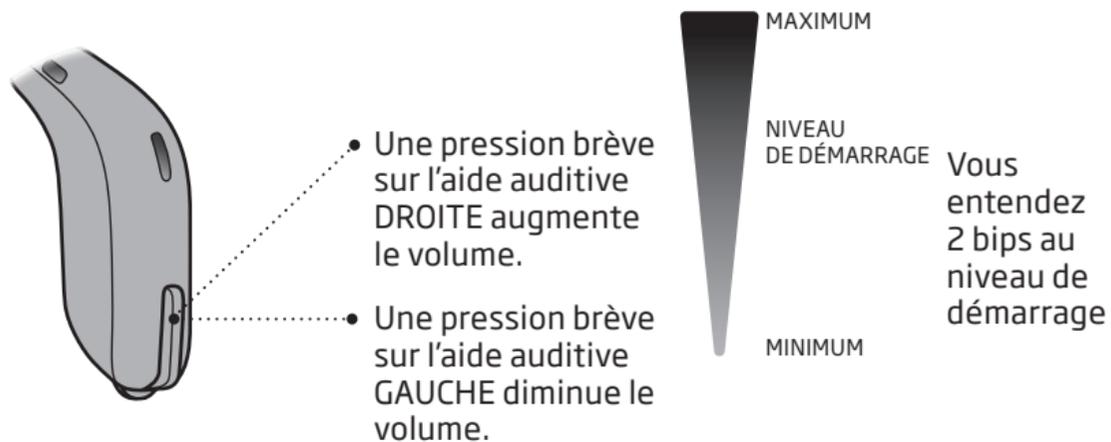

Activer le mode silencieux de l'aide auditive (en option)

Utilisez la fonction mode silencieux si vous avez besoin de rendre muette l'aide auditive pendant que vous la portez.

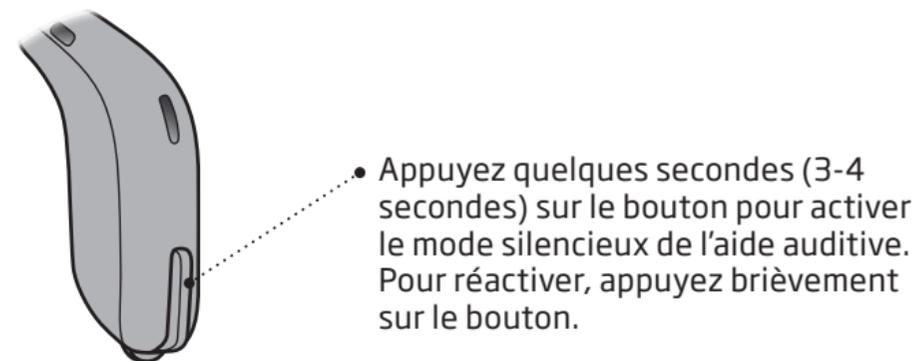


REMARQUE IMPORTANTE

N'utilisez pas la fonction mode silencieux pour arrêter votre aide auditive, car dans ce mode, elle continue à consommer l'énergie de la pile.

Changer le programme (en option)

Votre aide auditive peut avoir jusqu'à 4 programmes différents. Ils sont programmés par votre audioprothésiste.

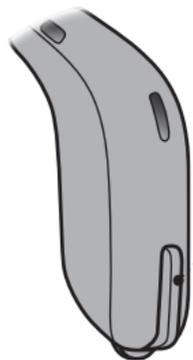

Appuyez sur le bouton pour changer de programme.

• Veuillez noter que si vous avez deux aides auditives, l'aide auditive DROITE permet d'avancer dans les programmes, en passant par exemple du programme 1 au programme 2 et l'aide auditive GAUCHE recule dans les programmes en passant par exemple du programme 4 au programme 3.

À faire remplir par votre audioprothésiste


Programme	Son que vous entendez lorsqu'il est activé	Quand l'utiliser
1	 1 bip	
2	 2 bips	
3	 3 bips	
4	 4 bips	

Changement de programme : Pression brève Pression longue


Réinitialisation rapide

Si vous souhaitez revenir aux réglages standards de l'aide auditive programmés par votre audioprothésiste, il vous suffit d'ouvrir et de refermer le tiroir pile.

Ouvrir

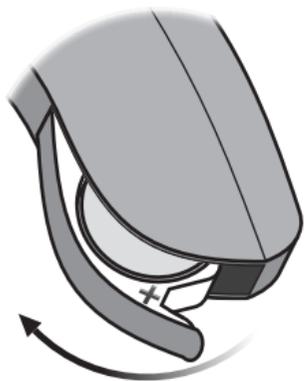

Fermer

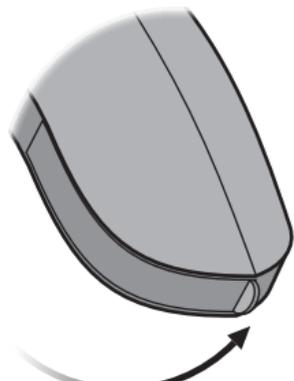

Utiliser les aides auditives avec iPod, iPhone et iPad

Votre aide auditive est « Made for iPhone® » et permet une communication et une commande directes avec un iPhone, iPad® ou iPod touch®.

avec vos aides auditives, veuillez contacter votre audioprothésiste ou consulter notre site d'assistance à l'adresse : www.oticon.fr, rubrique Assistance

Pour obtenir de l'aide concernant l'appairage et l'utilisation de ces produits



Oticon Opn est compatible avec iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 9,7 pouces, iPad Pro 12,9 pouces, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, et iPod touch (5ème et 6ème génération). Les appareils doivent être équipés d'iOS 9.3 ou supérieur.


Appairer l'aide auditive avec l'iPhone

1. Réglages




Dans votre iPhone, allez dans les « Réglages ». Activez le Bluetooth. Choisissez ensuite « Général ».

2. Général

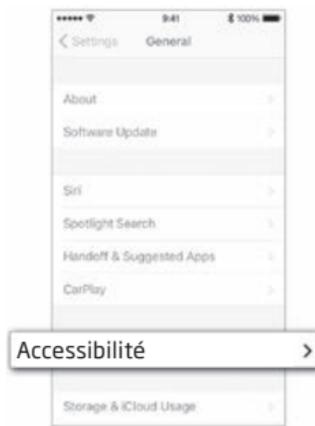


Dans « Général », choisissez « Accessibilité ».

3. Accessibilité

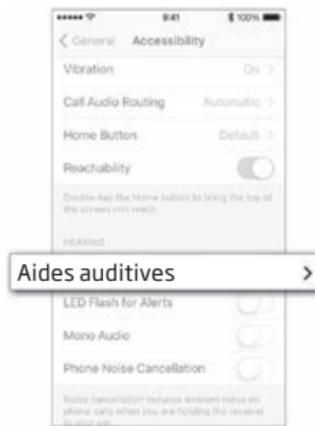


Dans « Accessibilité », choisissez « Mode appareil auditif ».

4. Allumer

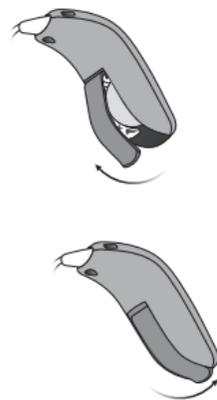

Ouvrez et fermez le tiroir pile de vos 2 aides auditives. Attendez environ 3 min pour qu'elles s'appairent avec votre iPhone.

5. Aides auditives

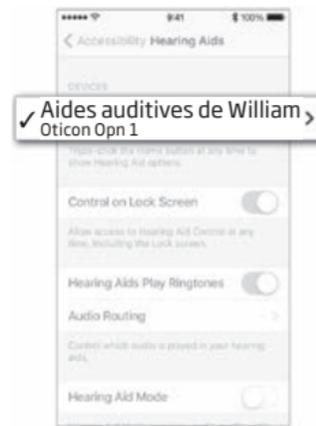

Vérifiez si votre iPhone a détecté vos aides auditives.

6. Votre aide auditive



Vous pouvez visualiser ici les options pour votre aide auditive.

« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec iPod, iPhone ou iPad peut affecter ses performances sans fil.

Application Oticon ON

L'application Oticon ON pour les appareils iPhone, iPad, iPod touch et Android™ offre une façon intuitive et discrète de commander votre aide auditive. L'application est disponible sur App Store® et Google Play™. Lors de l'installation de l'application Oticon ON sur iPad, recherchez les applications iPhone dans l'App Store.



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.oticon.global/connectivity

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Accessoires sans fil (en option)

Une vaste gamme d'accessoires sans fil est disponible afin d'améliorer les performances de votre aide auditive sans fil. Ils vous permettent de mieux entendre et de mieux communiquer dans de nombreuses situations quotidiennes.

ConnectClip

Lorsque ConnectClip est appairé avec votre téléphone portable, vous pouvez utiliser les aides auditives comme des oreillettes mains libres.

Adaptateur TV 3.0

L'Adaptateur TV est un émetteur sans fil du son provenant d'un téléviseur et d'appareils audio électroniques. L'Adaptateur TV diffuse le son

directement dans vos aides auditives.

Télécommande 3.0

La Télécommande vous permet de changer de programme, de régler le volume ou d'activer le mode silencieux de votre aide auditive. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre audioprothésiste ou consulter : www.oticon.fr, rubrique Assistance.

Autres options (en option)



Auto Phone

La fonction Auto Phone peut activer automatiquement un programme téléphonique dans l'aide auditive, si votre téléphone est doté d'un aimant dédié. L'aimant doit être placé sur votre téléphone près de la sortie du son.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Avertissements

Vous devez bien vous familiariser avec les avertissements d'ordre général suivants avant d'utiliser votre aide auditive pour votre sécurité personnelle et pour en garantir une utilisation correcte.

Veuillez noter qu'une aide auditive ne restaure pas une audition normale et ne prévient pas ou n'améliore pas une déficience auditive résultant de conditions biologiques. Il est également important de noter que, bien souvent, l'utilisation peu fréquente d'une aide auditive ne permet pas à l'utilisateur de bénéficier pleinement de ses avantages.

Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou des événements inattendus avec votre aide auditive.

Utilisation des aides auditives

- Les aides auditives doivent uniquement être utilisées en respectant les indications et le réglage de votre audioprothésiste. L'utilisation incorrecte d'une aide auditive peut provoquer une perte auditive soudaine et permanente.

- Ne jamais laisser quelqu'un d'autre utiliser votre aide auditive, elle peut être employée de façon incorrecte et abîmer définitivement les facultés auditives de cette personne.

Risques d'étouffement et risque d'avaler les piles

- Les aides auditives, leurs composants et les piles doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact.

- Les piles ont dans certains cas été confondues avec des pilules. Il faut donc toujours vérifier les médicaments que vous devez avaler.
- La plupart des aides auditives peuvent être munies d'un tiroir pile de sécurité. Ceci est fortement recommandé pour les enfants et les personnes handicapées mentales.
- Les enfants âgés de moins de 36 mois doivent toujours utiliser un tiroir pile de sécurité. Cette option est disponible sur les aides auditives BTE, mini BTE, RITE et mini RITE.

Avertissements

Si une personne avale accidentellement une aide auditive ou une pile, il faut appeler le SAMU ou un médecin.

Utilisation des piles

- Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Les piles de mauvaise qualité peuvent fuir et être à l'origine de blessures.
- Ne jamais tenter de recharger vos piles et ne jamais tenter de les brûler. Un risque d'explosion ne doit pas être exclu.

Dysfonctionnement

- Sachez qu'il est possible que votre aide auditive s'arrête de fonctionner de façon inattendue. Tenez-en compte lorsque vous dépendez de sons d'alerte (par exemple, lorsque vous êtes dans la circulation). Les aides auditives peuvent arrêter de fonctionner, par exemple si leurs piles sont déchargées ou si le tube est obstrué par de l'humidité ou du cérumen.

Implants actifs

- Faites preuve de prudence avec les implants actifs. En général, suivez les directives recommandées par les fabricants de défibrillateurs implantables et de stimulateurs cardiaques concernant l'utilisation avec des téléphones portables et des aimants.
- L'aimant Auto Phone et l'outil multi-usages (doté d'un aimant intégré) doivent être conservés à plus de 30 cm de distance de l'implant : ne les transportez donc pas dans une poche de poitrine par exemple.

- Si vous avez un implant intracrânien, veuillez contacter le fabricant de votre appareil implantable pour des informations sur les risques de perturbation.

Radiographie, tomodensitométrie, IRM, TEP scan et électrothérapie

- Retirez votre aide auditive avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, TEP scan et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés à votre aide auditive par des champs électromagnétiques importants.

Avertissements

Chaleur et produits chimiques

- L'aide auditive ne doit jamais être exposée à une température extrême, par exemple en la laissant dans une voiture garée en plein soleil.
- L'aide auditive ne doit pas être séchée dans un four à micro-ondes ou dans d'autres types de fours.
- Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer l'aide auditive. Enlevez toujours votre aide auditive avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

Effets secondaires possibles

- Les aides auditives, embouts ou dômes peuvent provoquer une accumulation plus rapide de cérumen.
- Bien que les matières utilisées pour fabriquer vos aides auditives soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires.

Veillez consulter un médecin si ces effets se produisent.

Interférences

- Votre aide auditive a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, des interférences entre l'aide auditive et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique, systèmes d'alarme de magasins et autres appareils) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre l'aide auditive et l'appareil concerné.

Utilisation en avion

- Votre aide auditive est équipée du Bluetooth. À bord d'un avion, le mode avion doit être activé sauf si le Bluetooth est autorisé par l'équipage.

Guide de dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solutions
Pas de son	Pile épuisée	Remplacez la pile
	Embouts obstrués (dôme, Grip Tip, Micro-Embout ou LiteTip)	Nettoyez l'embout Envisagez de remplacer le pare cérumen ou le dôme
Son intermittent ou réduit	Sortie du son bouchée	Nettoyez l'embout ou remplacez le pare cérumen ou le dôme
	Humidité	Nettoyez la pile et l'appareil avec un chiffon sec
	Pile épuisée	Remplacez la pile
Bruit aigu	Embout de l'aide auditive inséré de façon incorrecte	Réinsérez l'embout
	Cérumen accumulé dans le conduit auditif	Faites examiner votre conduit auditif par un médecin

Si aucune de ces solutions ne résout le problème, consultez votre audioprothésiste.

Résistant à l'eau et à la poussière (IP68)

Votre aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière, ce qui signifie qu'elle peut être portée dans toutes les situations quotidiennes.

Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de la transpiration ou du fait de mouiller votre aide auditive sous la pluie. Si votre aide auditive entre en contact avec de l'eau et cesse de fonctionner, veuillez respecter les consignes suivantes :

1. Essuyez l'eau délicatement
2. Ouvrez le tiroir pile, enlevez la pile et essuyez délicatement l'eau présente à l'intérieur
3. Laissez sécher l'aide auditive en laissant le tiroir pile ouvert pendant environ 30 minutes
4. Insérez une pile neuve

REMARQUE IMPORTANTE

Ne portez pas votre aide auditive pendant que vous vous douchez ou que vous participez à des activités nautiques. N'immergez pas votre aide auditive dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Conditions d'utilisation

Conditions de fonctionnement	Température : +1 °C à +40 °C Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation
Conditions de stockage et de transport	La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage : Température : -25°C à +60°C Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation

Certificat de garantie

Nom de l'utilisateur : _____

Audioprothésiste : _____

Adresse de l'audioprothésiste : _____

Téléphone de l'audioprothésiste : _____

Date d'achat : _____

Période de garantie : _____ Mois : _____

Appareil gauche : _____ N° de série : _____

Appareil droit : _____ N° de série : _____

Garantie internationale

Votre aide auditive bénéficie d'une garantie limitée internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'aide auditive à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, tubes, écouteurs, embouts et filtres, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des changements physiques au niveau de votre oreille, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont

PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, nous vous invitons à consulter votre audioprothésiste.

Si vous avez besoin de services d'entretien

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre aide auditive tout au long de sa durée de vie.

Informations techniques

Cette aide auditive contient 2 technologies radio, décrites ci-dessous :

L'aide auditive est équipée d'un émetteur radio utilisant la technologie de l'induction magnétique à ondes courtes, à 3,84 MHz. La force du champ magnétique est très faible et toujours en dessous de -40 dB μ A/m à 10mètres de distance.

Elle est aussi équipée d'un émetteur Bluetooth Low Energy (BLE) et une technologie radio propre à Oticon, tous deux à 2.4 GHz. Le transmetteur radio 2.4 GHz est faible et toujours en dessous de 4 dBm e.i.r.p. en puissance radiale totale.

Cette aide auditive répond aux normes internationales concernant la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine à cette technologie.

En raison de l'espace disponible restreint sur l'aide auditive, les marquages relatifs sont apposés sur ce document.

États-Unis et Canada

L'aide auditive contient un module avec :

FCC ID : U28AUMRIT
IC : 1350B-AUMRIT

L'appareil est conforme à la Partie 15 des règles FCC et RSS-210 d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne risque pas de causer d'interférences dommageables.
2. Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Plus d'informations sur www.oticon.fr

Le fabricant certifie que cette aide auditive est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



Fabriqué par :
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.oticon.global

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

CE 0543



Les déchets électroniques doivent être traités selon la législation locale.



E2831

Bluetooth
SMART

IP68

167737FR / 05.16

Aperçu des réglages de votre aide auditive				
Gauche			Droite	
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Commande de volume	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Changement de programme	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Mode silencieux	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Indicateurs de contrôle de volume				
<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé	Bips au volume min/max	<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé
<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé	Clics lors des changements de volume	<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé
<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé	Bips au volume préféré	<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé
Indicateurs de pile				
<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé	Indicateur de pile faible	<input type="checkbox"/> Activé	<input type="checkbox"/> Désactivé

167737FR / 05.16



oticon
PEOPLE FIRST

167737FR / 03.05.16 / FW rev. 1.X